


# MANUAL DE ENSAMBLAJE MÁSCARA PROTECTORA

1. Colocamos la lámina de forma horizontal.
2. Separamos la parte exterior de la visera como se muestra en la siguiente imagen:

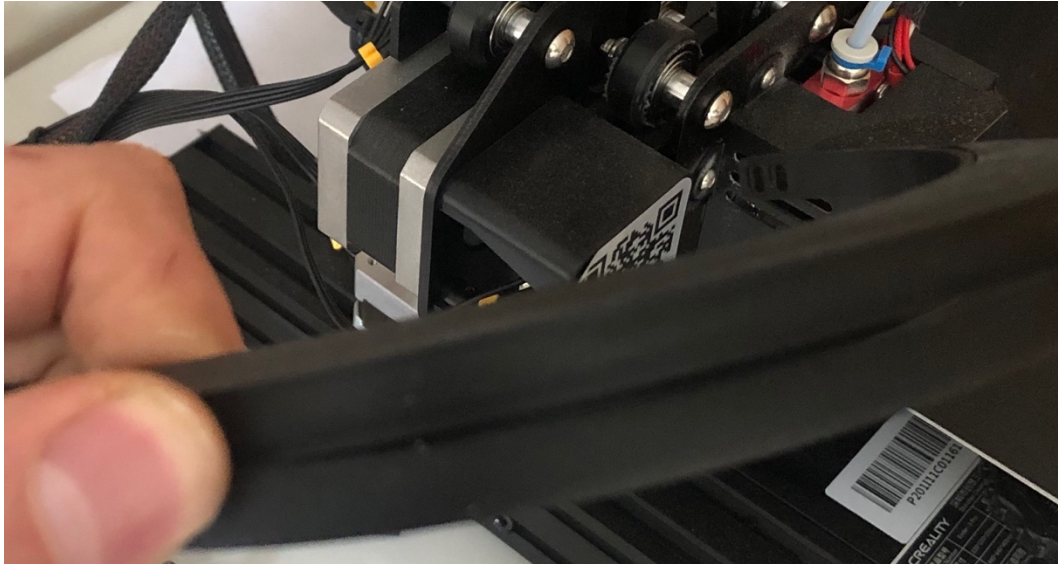

3. Introducimos la lámina de forma horizontal en la hendidura de la diadema frontal:



4. Seguimos introduciendo el resto de la lámina hasta que quede completamente dentro de la diadema.
5. Una vez introducida por completo bajamos la parte exterior de la diadema para que quede la lámina bien fijada.



6. Antes de su primer uso, para que la pantalla no se empañe, se recomienda lavar con jabón líquido en seco (sin agua) y luego retirarlo con agua tibia. Esto mismo se puede realizar para desinfectar la visera.

**¡ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS!**

**MUCHAS GRACIAS**



**DOMOELECTRIC  
CALDERON S.L.**

Mucho más que un PR  YECTO

Síguenos en:



[www.domoelectriccalderon.com](http://www.domoelectriccalderon.com)